


# Johnson & Johnson-Wunddokumentationssystem

## Pflegestandard zur Wundbehandlung

Pflegeproblem	Pflegeziel	Wundverband	Pflegemaßnahme	Standard
Granulierende Wunde (Wunde frei von sichtbaren Infektionsanzeichen und Nekrosen)	Epithelisierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AKTIVES WUNDTHERAPEUTIKUM</b> PROMOGRAN*</li> <li>• <b>WUNDABDECKUNG</b> - oberflächliche Wunde bis 1,5 cm Tiefe:  TIELLE* (Borderless bei vorgeschädigter bzw. empfindlicher Wundumgebung)  - tiefe Wunde ab 1,5 cm Tiefe: zusätzlich zwischen PROMOGRAN* und TIELLE* mit TRIONIC* Tamponade bis auf Hautniveau austamponieren</li> <li>• <b>ANSCHLUSSBEHANDLUNG</b> Siehe <b>W5</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hygienische Händedesinfektion</li> <li>• Unsterile Handschuhe anziehen, Wundabdeckung entfernen, Verband und Handschuhe sofort in ein bereitgestelltes Abwurfbehältnis abwerfen.</li> <li>• Sterile Handschuhe anziehen.</li> <li>• Wunde mit körperwarmer Ringerlösung oder NaCl spülen.</li> <li>• PROMOGRAN* mittels steriler Pinzette auf das Wundbett applizieren und in vorhandene Taschen eintamponieren. Gegebenenfalls Wunde mit TRIONIC* Tamponade bis auf Hautniveau austamponieren.</li> <li>• Oben genannte Produkte mit Ringerlösung bzw. NaCl anfeuchten, außer bei starker Exsudation.</li> <li>• Anschließend die Wundumgebung sorgfältig abtrocknen, damit eine optimale Haftung der sekundären Wundabdeckung gewährleistet ist.</li> <li>• Nun die Wunde mit der entsprechenden TIELLE* Wundaufgabe min. 1-2 cm über den Wundrand bzw. die vorgeschädigte Wundumgebungshaut hinaus abdecken.</li> <li>• Verbandwechsel je nach Exsudation alle 2-3 Tage durchführen.</li> <li>• Hygienische Händedesinfektion</li> <li>• Dokumentation der Pflegemaßnahmen (s.u.)</li> </ul> <p><b>Zusätzliche Pflegemaßnahmen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ggf. den Patienten/Bewohner zweistündlich lagern (Dekubitus) (s. Johnson &amp; Johnson Lagerungsstandard)</li> <li>• Ggf. dem Patienten/Bewohner die Beine wickeln (Ulcus cruris venosum) (s. Johnson &amp; Johnson Kompressionsstandard)</li> <li>• Dokumentation der Wundbehandlung (s. Johnson &amp; Johnson Dokumentationssystem)</li> </ul>	

# Johnson & Johnson-Wunddokumentationssystem

## Pflegestandard zur Wundbehandlung

Pflegeproblem	Pflegeziel	Wundverband	Pflegemaßnahme	Standard
Epithelisierende Wunde	Reepithelisierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WUNDABDECKUNG</b> TIELLE* Lite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hygienische Händedesinfektion</li> <li>• Unsterile Handschuhe anziehen, Wundabdeckung entfernen, Verband und Handschuhe sofort in ein bereitgestelltes Abwurfbehältnis abwerfen.</li> <li>• Sterile Handschuhe anziehen.</li> <li>• Wunde mit körperwarmer Ringerlösung spülen. Anschließend die Wunde mit TIELLE* Lite min. 1-2 cm über den Wundrand bzw. die vorgeschädigte Wundumgebungshaut hinaus abdecken.</li> <li>• Verbandwechselintervall bis zu 7 Tagen</li> <li>• Hygienische Händedesinfektion</li> <li>• Dokumentation der Pflegemaßnahme (s.u.)</li> </ul> <p><b>Zusätzliche Pflegemaßnahmen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ggf. den Patienten/Bewohner zweistündlich lagern (Dekubitus) (s. Johnson &amp; Johnson Lagerungsstandard)</li> <li>• Ggf. dem Patienten/Bewohner die Beine wickeln (Ulcus cruris venosum) (s. Johnson &amp; Johnson Kompressionsstandard)</li> <li>• Dokumentation der Wundbehandlung (s. Johnson &amp; Johnson Dokumentationssystem)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>W5</b></p>